

Foglio informativo per il paziente

Matrice di tessuto ricostruttivo NovoMatrix™



Caro paziente,

Lei sta per sottoporsi ad un intervento chirurgico. Il chirurgo desidera utilizzare il nostro prodotto NovoMatrix™ per la ricostruzione del tessuto molle mancante. Questo foglio informativo non sostituisce il colloquio diretto con il dentista. Le informazioni qui fornite riguardano le proprietà del materiale NovoMatrix™.

Perchè è necessario fornire un consenso informato?

Il Suo medico è tenuto ad informarLa delle proprietà, ed in particolare del meccanismo d'azione, delle opportunità e dei rischi di NovoMatrix™, e a illustrare tutte le alternative di trattamento prese in considerazione. Questo foglio è uno strumento per fornire tali informazioni. I risultati della terapia possono variare da paziente a paziente.

Quali sono le cause di una mancanza di tessuto molle?

L'atrofia delle gengive può avere cause molto diverse, ad esempio un incidente o una malattia infiammatoria dovuta, ad esempio, alla placca batterica (parodontite). Anche l'estrazione dei denti è spesso associata ad una riduzione dell'altezza e dello spessore dell'osso a causa della mancanza di carico meccanico, e lo stesso avviene di conseguenza per le gengive. Ma un volume sufficiente di gengiva è condizione fondamentale per la stabilità a lungo termine dei denti o degli impianti dentali. Ed è anche molto importante per l'estetica dei denti e delle gengive.

Perchè usare NovoMatrix™?

Lo spazzolamento aggressivo dei denti e la malattia parodontale sono le due cause principali della recessione e possono produrre le conseguenze seguenti:

- sorriso poco attraente
- sensibilità radicolare
- perdita di osso di sostegno
- carie
- formazione di placca
- rischio di recessione futura

Che cos'è la Matrice di tessuto ricostruttivo NovoMatrix™ ?

NovoMatrix™ è una matrice dermica acellulare derivata da derma suino trattato per rimuovere le cellule. Questo metodo brevettato preserva l'integrità del tessuto e crea una matrice tissutale rigenerativa per l'applicazione nella rigenerazione dei tessuti molli; la matrice di tessuto consente un'ottima ricostruzione grazie alla ripopolazione cellulare, ad una risposta infiammatoria minima e una rapida rivascolarizzazione.

Quali le alternative?

A volte la recessione gengivale è trattata prelevando il tessuto molle dal palato. Ma prelevare una parte di palato comporta dolore e fastidi che a volte è possibile evitare.

Sicurezza della matrice di tessuto ricostruttivo NovoMatrix™

Il tessuto suino impiegato per la produzione di NovoMatrix™ deriva da un lotto medico degli Stati Uniti (USA); il tessuto subisce approfonditi controlli e test prima del processo brevettato, per garantire che NovoMatrix™ sia idoneo all'uso nei pazienti.

Cosa aspettarsi?

Il sito può essere coperto con una medicazione, secondo necessità. La fase di guarigione varia da paziente a paziente.

Si prega pertanto di seguire le istruzioni del chirurgo:

- limitare lo spazzolamento vicino al sito chirurgico
- evitare di masticare vicino al sito
- assumere i farmaci prescritti:
 - antibiotici
 - antidolorifici
 - collutorio

Vi sono effetti collaterali noti?

I possibili effetti collaterali che possono derivare dall'innesto di tessuto comprendono: infezione della ferita o sistemica, infiammazione, retrazione dei tessuti molli, reazione di ipersensibilità allergica o altre risposte immunitarie.

Dichiarazione di consenso

Matrice di tessuto ricostruttivo NovoMatrix™

Sono stato informato sul prodotto NovoMatrix™ in modo comprensibile.
Ho compreso il contenuto delle informazioni e acconsento al trattamento con NovoMatrix™.

Nome del paziente

Indirizzo del paziente

Data di nascita del paziente

Data Firma del paziente

Data Firma del medico curante/consulente

Data Firma dell'assistente

Timbro

Commenti

Distributore

BioHorizons Camlog Italia | Via Ettore Cristoni 88 | 40033 Casalecchio di Reno (BO) | Italia
marketing.italia@biohorizons.com | www.biohorizonscamlog.com/italy

Headquarters

CAMLOG Biotechnologies GmbH | Margarethenstr. 38 | 4053 Basilea | Svizzera
Tel. +41 61 565 41 00 | Fax +41 61 565 41 01 | info@camlog.com | www.camlog.com

NovoMatrix™ è un marchio della LifeCell™ Corporation, società affiliata Allergan.
BioHorizons® è un marchio registrato di BioHorizons. ©BioHorizons. Tutti i diritti riservati.
I prodotti non sono disponibili integralmente in tutti i paesi.

